

Mitä tapahtuu toimenpiteen jälkeen?

Useimmiten potilaat kotiutetaan hoitopäivänä.³ Joillakin naisilla voi esiintyä vatsakouristuksia noin vuorokauden ajan toimenpiteen jälkeen.³ Lääkäri voi suositella kipulääkettä niiden lievittämiseksi. Hoidon jälkeen saattaa esiintyä myös vuotoa. Tämä kuuluu kohdun normaaliin toipumisprosessiin.³ Jos olet huolissasi jostain, ota yhteyttä sairaalan henkilökuntaan.

Usein kysyttyä:

Onko palloablaatio tehokas?

Yli 80 % LiNA Libratalla™ hoidetuista naisista on ollut tyytyväinen toimenpiteeseen ja heidän kuukautisvuotonsa on vähentynyt.⁴

Onko LiNA Librata™ sopiva vaihtoehto minulle?

LiNA Librata™ -toimenpide sopii naisille, joilla on runsaat kuukautiset ja jotka eivät halua saada enää lapsia. Hoidon sopivuus riippuu kuitenkin useista eri tekijöistä. Tästä syystä on tärkeää keskustella lääkärin kanssa ja päättää yhdessä, mikä hoito sopii sinulle parhaiten.

Tarvitsetko vielä ehkäisyä?

Kyllä. Endometristen ablaatiotoimenpiteiden jälkeen on edelleen pieni mahdollisuus tulla raskaaksi. On tärkeää jatkaa sopivan ehkäisyn käyttöä toimenpiteen jälkeen. Endometrista ablaatiota ei tule tehdä, jos haluaa tulla raskaaksi. Endometrisen ablaation jälkeinen raskaus voi olla vaarallinen sekä äidille että sikiölle.

Jos sinulla on kysyttävää, käänny sairaalan henkilökunnan puoleen.



LiNA Librata™

Noin 2 minuutin lämpöhoito

LiNA on LiNA Medicalin rekisteröity tavaramerkki EU:ssa, Yhdysvalloissa ja Kiinassa.
©2019 LiNA Medical ApS. Kaikki oikeudet pidätetään.

LiNA Medical ApS

Formervangen 5, DK-2600 Glostrup, Tanska | Puh. +45 43 29 66 66, faksi: +45 43 29 66 99
info@lina-medical.com www.lina-medical.com CVR: 10054974

¹ "Heavy menstrual bleeding." Centers for Disease Control and Prevention, <https://www.cdc.gov/ncbddd/blooddisorders/women/menorrhagia.html>. Accessed 31 May 2019.

² LiNA Librata™ Instructions for Use.

³ "Endometrial Ablation." Royal College of Obstetricians & Gynaecologists, 22 Oct. 2015, www.rcog.org.uk/en/patients/patient-leaflets/endometrial-ablation/.

⁴ Guyer, Christopher. "Clinical evaluation of the Librata endometrial ablation device in an outpatient setting." ESGE Annual Congress 2018. Messe Wien Exhibition & Congress Center. Vienna, Austria. Oral Presentation.


Hallitse runsaita kuukautisia



LiNA Librata™

Noin 2 minuutin lämpöhoito

LiNA Librata Patient brochure / 2019-06 8X0154A.fi

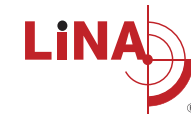

Innovation in Gynecology

Mitä runsaat kuukautiset tarkoittavat?

Arviolta joka viidennellä naisella on runsaat kuukautiset eli menorragia.¹ Runsaat kuukautiset voivat usein häiritä naisen normaalia elämää, edellyttää kuukautissuojan vaihtamista usein, rajoittaa toimintaa ja vaikuttaa vaatevalintoihin mahdollisten ylivuotojen salaamiseksi.

Oireet

Tavallisesti kuukautiset kestävät 5–7 päivää, mutta jos kärsit runsaasta kuukautisvuodosta, sinulla saattaa esiintyä joitakin tai kaikkia seuraavista oireista:

- Kuukautiset kestävät yli 7 päivää
- Kuukautissuoja on vaihdettava jo muutaman tunnin kuluttua
- Mahdollisten ylivuotojen aiheuttama pelko ja jännitys
- Kuukautisvuodossa on suuria verihyytymiä
- Voimakkaat kuukautiskivut
- Väsymys ja uupumus

Hoidot

Runsaat kuukautisia voidaan hoitaa eri tavoilla. Sopiva hoito riippuu monista eri tekijöistä: terveydestä, perhetilanteesta, kuukautisvuodon määrästä ja siitä, millainen vaikutus sillä on elämänlaatuun. Näistä tekijöistä riippuen vaihtoehdot vaihtelevat lääkkeitä kirurgisiin toimenpiteisiin, jotka voivat olla joko väliaikaisia tai pysyviä.

Yksi hoitovaihtoehtoista on endometrinen ablaatio **LiNA Libratalla™**. Tämä on minimaalisen invasiivinen toimenpide. Keskustele lääkärin kanssa LiNA Libratan™ sopivuudesta sinulle.

Ota kuukautiset hallintaan LiNA Libratan™ avulla

LiNA Librata™ on endometrinen ablaatiotoimenpide, joka auttaa vähentämään kuukautisvuotoa tai jopa lopettamaan sen. Nopeassa noin kahden minuutin lämpöhoidossa LiNA Librata™-instrumentti kuumentaa kohdun limakalvon, joka aiheuttaa kuukautisvuodon.² Toimenpide auttaa hallitsemaan tehokkaasti runsaita kuukautisia.


LiNA Libratan™ edut:

- Lämpöhoitokerta kestää noin kaksi minuuttia
- Ei kirurgisia viiltoja
- Toimenpiteen jälkeen pääsee heti kotiin (ei tarvetta jäädä sairaalaan)
- Yksinkertainen toimenpide (vain muutama vaihe)



Mitä tapahtuu ennen toimenpidettä?


Ennen toimenpidettä lääkäri keskustelee kanssasi käytettävästä anestesiasta (esim. paikallispuudutus, suonensisäinen rauhoittava lääke, nukutus). Sinulle voidaan määrätä lääkitys, jotta toimenpide olisi mukavampi.

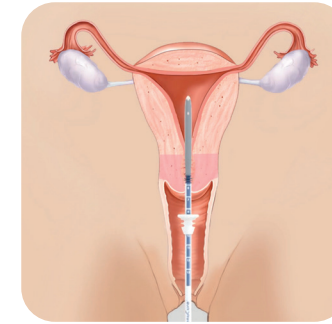

Miten se toimii?


Vaihe 1 – Sisälle vieti

Lääkäri vie ohuen, pehmeän pallokatettrin kohdunkaulan kautta kohtuun. Leikkaushaavoja ei tarvita.

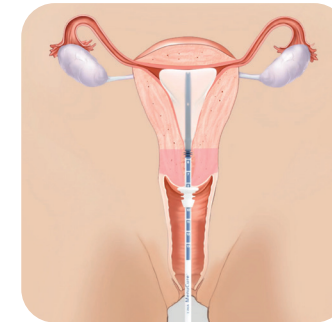

Vaihe 2 – Hoito

Pallo täytetään varovasti kuumalla nesteellä niin, että se täyttää kohdun. Neste kiertää noin kahden minuutin ajan kohdun limakalvon käsittelemiseksi.

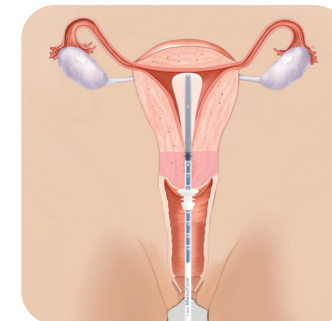

Vaihe 3 – Poistaminen

Hoidon jälkeen pallokatetri tyhjennetään ja poistetaan kohdusta.

Mitä tapahtuu toimenpiteen aikana?

Joissain tapauksissa sairaalan henkilökunta voi käyttää paikallispuudutusta sekä dilatoida eli laajentaa kohdunkaulan laitteen sisäänviennin mahdollistamiseksi. Saatat kokea toimenpiteen aikana kuukautiskipuja muistuttavia tunteita.