

# ClearView<sup>TM</sup>

Huurteen estävä optiikan lämmitin

Huurtumisenesto

Turvallinen

*Surgeon's  
comfort*


Nopea

Helppokäyttöinen

Esilämmittää optiikan vastaamaan  
kehon lämpötilaa

Ilman sähköä tai kuumaa vettä

Nopesti käyttövalmis

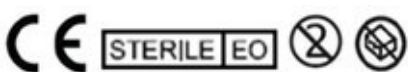

supporting surgical outcomes


# ClearView™

Huurteen estävä optiikan  
lämmitin



## Käyttöohjeet

### 1. ASETA OPTIIKKA LÄMMITTIMEEN

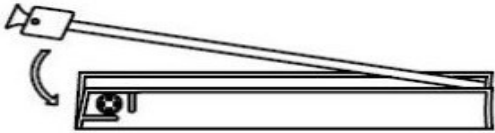

### 2. NAKSAUTA AKTIVOINTINAPPIA ALOITTAAKSESI LÄMMITTÄMISEN



### 3. VALMIS KÄYTETTÄVÄKSI

Saavuttaa täyden lämpötilan 15 minuutissa.

ClearView™ pysyy lämpimänä 2 tuntia.


Peitetään steriilillä pyyhkeellä lämmön säilyttämiseksi.

Hävitetään sekajätteenä.

ClearView optiikan lämmitin tuo huomattavan parannuksen optiikan esilämmittämiseen. ClearView lämmittää 75% paremmin optiikan verrattuna lämpimään vesihautteeseen. Tämä merkittävä ero varmistaa, että koko optiikka lämmitetään vastaamaan kehon lämpötilaa, mikä estää tehokkaasti huurtumisen.

Tuotekoodi: **31SW30**

30 kpl/ltk

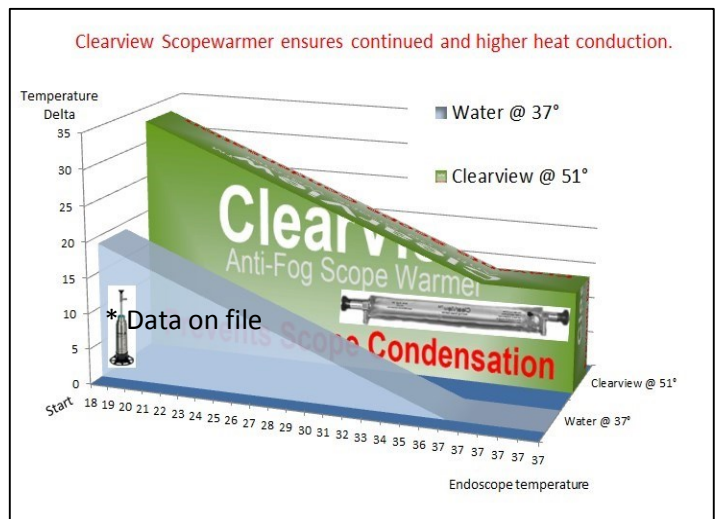

**KEBOMED OY**  
PHONE + 358 20 7931 090  
EMAIL: [info@kebomed.fi](mailto:info@kebomed.fi)  
WEB: [www.kebomed.fi](http://www.kebomed.fi)

# KEBOMED