

rezūm®

PIKA-ALOITUSOPAS


TARVITTAVAT VÄLINEET

- Rezūm-generaattori vankassa vaunussa
- Rezūm-antolaitte
- Rezūm-varustepakkaus (valinnainen)
- Erillinen taso/vaunu Rezūm-antolaitteen asentamiseksi steriiliin kenttään
- Huoneenlämpöinen normaali suolaliuos (1 l, 2 l, 3 l, 4l, 5 l tai 500 ml)
- Tippateline
- Kystoskoopin linssi (30 astetta, 4 mm, 30 cm) Storz tai Richard-Wolf
(30 asteen ja 4 mm:n Olympus- ja ACMI-linsit ovat 28 cm pitkiä, minkä vuoksi ne eivät sovellu käytettäväksi Rezūm-laitteessa.)
- Vesiliukoinen liukaste
- Videokamera ja näyttö
- Valo ja johto
- Potilastuoli, jossa jalkatelineet litotomia-asentoa varten (lonkat koukistettuina 90 astetta)
- Paikallisesti käytettävä antiseptinen liuos potilaan valmistelua varten
- Steriili liina tai liinoja (riittävän suuri potilaan alavatsan ja reisien peittämiseksi; mahdollisesti reikäliina, jotta penis ei peity)
- Sanko tyhjennysletkua varten
- Kertakäyttöiset alustat lattialle
- Hemostaatti ja 4x4-sideharsoja (tarvittaessa)
- Istuin/tuoli lääkärille
- Toimenpiteen jälkeen käytettävä katetri (tarvittaessa)

REZŪM-JÄRJESTELMÄ



HUONEJÄRJESTYS

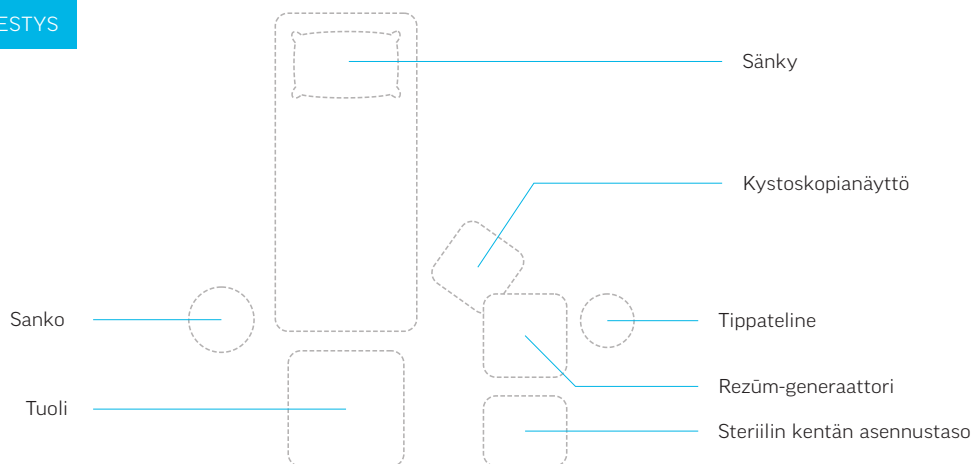

1

**PURA LAITE PAKKAUKSESTA**

Ota ruisku ja neulan adapteri antolaitteen pakkauksesta puhdasta menetelmää käyttäen ja kiinnitä neula ruiskuun.

2

**TÄYTÄ RUISKU**


Täytä Rezūm-ruisku mukana toimitetulla ampullilla, joka sisältää 50 ml steriiliä vettä, ja varmista, ettei ruiskuun jää yhtään ilmakuplia.

3

**LIITÄ GENERAATTORI**

Liitä radiotaajuusjohto generaattoriin. Varmista, että valkoinen ja punainen täplä ovat kohdakkain.

4

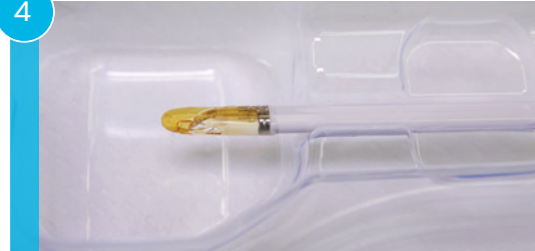**NEULAN TAKAISINRETÄMINEN**

Varmista, että neula on vetäytynyt automaattisesti takaisin.

5

**ASEMOI SUOLALIUKSEN HUUHTELULETKU PUMPPUUN**

Aseta suolaliuksen huuhteluletku suolaliuksen kiertopumppuun värimerkintöjen mukaisesti.

6

**LIITÄ SUOLALIUKSEN HUUHTELULETKU**

Liitä suolaliuksen huuhteluletku suolaliuospuussiin ja varmista, että tiputuskamion puristin ja venttiili ovat auki.

7

**LIITÄ VESILETKU**

Aseta täytetty ruisku ruiskukoteloon. Irrota sininen suojakorkki steriilistä vesiletkusta ja liitä vesiletku ruiskuun siten, että valkoinen paineventtiili osoittaa alaspäin.

8

**SULJE TYHJENNYSOLETKU**

Sulje tyhjennysletku puristimella sen varmistamiseksi, että suolaliuos pääsee virtaamaan antolaitteen läpi toimenpiteen aikana.

9

**ASETA KYSTOSKOOPIN LINSSI**

Liukasta kystoskoopin linssi ja työnnä sitä antolaitteeseen, kunnes se napsahtaa paikalleen. Kystoskoopin linssin on oltava ominaisuuksiltaan 30 astetta, 4 mm ja 30 cm.

10

**ESITÄYTÄ LAITE**

Esitäytä laite painamalla valkoista huuhtelun aktivointipainiketta ja harmaata neulankäyttöpainiketta, kunnes neula aktivoituu. Pitele laitteen vartha jätenesteastian päällä. Paina sinistä höyrynaktivointipainiketta ja pidä sitä pohjassa, kunnes esitäyttöjakso on suoritettu loppuun (noin 30 sekuntia). Rezūm-järjestelmä on nyt asennettu ja se on käyttövalmis Rezūm-toimenpidettä varten.